

Проходилка

Инструкция за експлоатация

Издание: EJ 02.2023

rexa
Г Р У П

www.reha.bg



2FSD



2FS



VITEA
CARE

Съдържание

Въведение	3
Предложения	3
Показания.....	4
Противопоказания	4
Описание на продукта.....	4
Употреба	5
Регулиране на височината	6
Придвижване с проходилка със степенна функция	6
Движение с функция блокирана стъпка.....	6
Инструкции за безопасност	7
Технически параметри	8
Сервиз и ремонт.....	8
Грижи и поддръжка	8
Почистване	9
Дезинфекция.....	9
Изхвърляне на продукта	9
План за поддръжка	9
Символи	10
Данни за контакт	11

Въведение

Благодарим ви, че избрахте нашия продукт. Ние сме дълбоко убедени, че ще отговори на вашите очаквания. Моля, прочетете тази инструкция преди първа употреба. Това ръководство е предоставено, за да предостави необходимата информация за безопасната употреба на устройството. Правилното прилагане на препоръките ще допринесе значително за удължаване на дълготрайността и естетиката на продукта. Искаме да подчертаем, че постоянно се опитваме да подобрим качеството на нашите продукти, което може да доведе до малки промени, които не са включени в ръководството. Моля, уверете се, че сте попълнили приложения гаранционен формуляр и го върнете на вашия дистрибутор, за да можем да ви предоставим възможно най-доброто обслужване.

ВНИМАНИЕ!

Винаги следвайте основните предпазни мерки в съответствие с информацията, дадена по-долу, относно безопасността при използване на продукта. Прочетете внимателно цялото ръководство преди употреба.



ВНИМАНИЕ!

Неправилната употреба може да доведе до сериозно нараняване, небезопасни условия или неизправност на продукта.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

Следвайте инструкциите по-долу, за да поддържате продукта си в добро работно състояние.

Ако продуктът се използва от друго лице, трябва да му предоставите копия от тези инструкции за употреба.

Тези инструкции за употреба се отнасят до дизайна и спецификациите на продукта към момента на публикуване. Поради промени в дизайна, някои илюстрации и снимки в ръководството може да не отговарят на продукта, който сте закупили. Запазваме си правото да правим промени в дизайна.

Производителят отхвърля всякаква отговорност за лични наранявания или имуществени щети, които могат да възникнат от неправилна или опасна употреба на този продукт.

Показания

Помощно средство за ходене, предназначено за хора с увреждания и с двигателни нарушения. Идеален за рехабилитационен процес и физиотерапия (вертикализация, релеф на долните крайници).

Противопоказания

Противопоказания за изправено положение, наранявания и дисфункции на горните крайници, които не позволяват на пациента да се поддържа.

Описание на продукта:



Използване

Продуктът е опакован във форма за сглобяване. След като разопаковате пакета, проверете дали съдържа всички части в съответствие със списъка с елементи, даден по-горе (Фигура 1).

Уверете се, че всички компоненти нямат видими повреди. Ако имате съмнения, моля, свържете се с дистрибутора.

За да разгънете проходилката, трябва да облегнете страните ѝ максимално навън до момента на застопоряване на блокажа. (Фигура 3.).

За лесно съхранение и транспортиране проходилката може да се сгъва.

За да направите това, трябва да поставите заключващи щифтове, които са с движещи се функции, върху подсилващата рамка.

След това натиснете бутона за сгъване, поставен върху рамката, и сгънете страничните рамки.



Фигура 2.



Фигура 3.

Бутон за
сгъване



ВНИМАНИЕ!

Трябва да се внимава особено, когато сгъвате проходилката, тъй като има риск от блокиране на пръсти или ръце.



Поставете
заклучващите щифтове
и блокирайте
проходилката от
сгъване.

Заклучващи
щифтове, поставени
върху подсилващата
рамка.

Фигура 4.




Фигура 5.

- На подсилващата рамка са разположени заключващи щифтове със стъпкова функция (Фигура 5.). Те са разположени в дупки, предпазващи от загуба (Фигура 4.)
- За да блокирате функцията step by step, трябва да премахнете заключващите щифтове от подсилващата рамка и да я поставите в позиция, която блокира функцията за ходене (Фигура 4.).
- Функцията за заключена стъпка предотвратява движението при ходене и сгъването на рамката на проходилката.
- За лесно съхранение и транспортиране проходилката може да се сгъва. Тя трябва да бъде сгъната до позицията, показана на (Фигура 2.)

Регулиране на височината

- Преди да използвате проходилката, тя трябва да се регулира според височината на потребителя чрез телескопично регулируема дължина на краката (Фигура 6.).
- За да направите това, издърпайте щифта за регулиране на височината на краката и в зависимост от нуждите намалете височината или ги удължете.
- Важно е дължината на всички крака да е еднаква. Дръжките трябва да са успоредни на земята и да осигуряват комфорт и чувство за сигурност на потребителя.

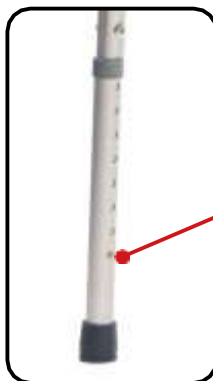

Щифт за регулиране височината

Фигура 6.

Придвижване с проходилка със степенна функция

Стъпковата функция е активирана, когато заключващите щифтове са разположени в подсилващата рамка. Моля, застанете близо до проходилката, като държите дръжките с две ръце.

За да използвате изделиято, последователно повдигнете страничните части на проходилката и ги преместете напред и след това поставете крака.

Движение с функция блокирана стъпка

Трябва да преместите заключващия щифт от подсилващата рамка и да я поставите в заключено положение, т.е. функция за ходене и сгъване на проходилката (Фигура 4.).

За да сгънете проходилката, преместете заключващия щифт в подсилващата рамка.

Инструкции за безопасност



ВНИМАНИЕ!

Всеки „сериозен инцидент“, свързан с проходилката, трябва да бъде докладван на производителя и на компетентния орган на държавата-членка, в която пребивава потребителят.



ВНИМАНИЕ!

Продуктът е предназначен за употреба от хора с увреждания и двигателни нарушения. Ако не сте сигурни дали вашето здравословно състояние ви позволява да използвате продукта, консултирайте се с медицински специалист.



ВНИМАНИЕ!

Не модифицирайте продукта по никакъв начин; това ще анулира гаранцията.

**ВНИМАНИЕ!**

Превишаването на максималното тегло на потребителя ще анулира гаранцията. Производителят не носи отговорност за наранявания или щети, причинени от неспазване на максималното тегло на потребителя.

**ВНИМАНИЕ!**

Преди да използвате проходилката, вижте това ръководство и го запазете за бъдещи справки.

- Използването на продукта върху заледени, мокри, мазни, силно пясъчинки повърхности е недопустимо - създава риск от падане.

- Проходилката трябва да се използва на равни повърхности с наклон по-малък от 5%.

Преди всяка употреба на този продукт:

- Извършете визуална проверка на всички структурни компоненти на продукта,

- Внимателно проверете стабилността и състоянието на носещата рамка.

- Не използвайте проходилката в случай на видима или осезаема повреда (напр. пукнатини в рамката). Може да причини инцидент.

- Проходилката е предназначена за потребители с максимално тегло до 110 кг.

- Проходилката е проектирана да поддържа един човек, катеренето и стоенето върху нея е строго забранено.

- Не оставяйте проходилката близо до открити източници на огън.

- Имайте предвид, че температурата на повърхността на тапицерията и частите на рамката може да се повиши след излагане на слънце или друг източник на топлина. Освен това при ниски температури има опасност от преохлаждане на металните части на проходилката. Може да причини изгаряния или измръзване на части от тялото.

- Всички ремонти трябва да се извършват от квалифициран персонал.

- Не превишавайте максималната височина.

- Дръжте проходилката с двете си ръце едновременно по посока на движението.

- Уверете се, че ключалката, използвана за сгъване и разгъване на проходилката, работи правилно.

- Производителят забранява извършването на каквито и да е модификации на проходилката сами. Това може да причини падане или сериозни наранявания.

- Производителят не носи отговорност за подобни действия.

- Има риск от заклещване на пръсти при сгъване на рамката на проходилката.

**ВНИМАНИЕ!**

Максимално тегло на потребителя 110 кг.

Технически параметри

Модел		
Опции	без колелца	с колелца
Максимално тегло на потребителя	110 kg	
Височина	795-970 mm	820-990 mm
Широчина	530 mm	540 mm
Дължина	460 mm	490 mm
Тегло	2.5 kg	3.0 kg
Диапазон на нивата на височина	8	
Ниво на корекция	25 mm	
Максимален безопасен наклон	5% (2,86°)	
Материали	Алуминий, полиуретан, гума	
Описание на средата, в която ще се използва продуктът	  	
Разрешена температура	от +5°C до +40°C	
Влажност за съхранение и употреба	от 30% до 70%	

Сервиз и ремонт

Прегледът трябва да се извършва редовно, като трябва да се предшества от цялостно почистване на продукта (за да се разкрият скрити повреди). Ако са необходими ремонти или ако имате въпроси относно продукта, моля, свържете се с вашия дистрибутор.

Грижа и поддръжка

Почистете рамката с влажна кърпа, посредством мек почистващ препарат. Отстранете всички замърсявания от подвижните компоненти на проходилката (колелца, затягащи винтове, ключалки).

За да се поддържат параметрите на проходилката, е много важно всички елементи да се поддържат чисти и съхранявани правилно. Съхраняването на проходилката на влажни места (бани, перални и др.) или на открито, съчетано с липса на хигиена, бързо ще влоши ефективността и естетиката на проходилката.

Не излагайте проходилката на екстремни метеорологични условия (дъжд, сняг, силно слънце), защото някои части могат да променят цвета си.

Не е разрешено използването на:

- разтворители
- силни препарати
- остри четки и твърди предмети
- почистващи препарати, които съдържат хлор
- корозивни детергенти

Не почиствайте проходилката с агрегати под налягане или пара!

Дезинфекция

Ако продуктът се използва от няколко души (напр. в старчески дом), трябва да се използват налични в търговската мрежа дезинфектанти. Преди дезинфекция почистете тапицериата и дръжките. За дезинфекция могат да се използват само тествани и одобрени дезинфектанти.

Информация за признати и одобрени дезинфектанти и методи за дезинфекция можете да получите от вашия национален здравен орган.



ВНИМАНИЕ!

Използването на дезинфектанти може да повреди външните повърхности, което може да намали дългосрочната функционалност на компонентите. Следвайте инструкциите, предоставени от производителя на химическия продукт.

Изхвърляне на продукта

Продуктът трябва да се изхвърли в съответствие с приложимите местни и национални разпоредби. За информация относно правилното изхвърляне на опаковки, метални компоненти, пластмасови компоненти, неопрени, силиконови и полиуретанови материали, моля, свържете се с местната компания за изхвърляне на отпадъци или оторизиран дистрибутор.

План за поддръжка

Честота	Обект на контрол	Коментари
Преди първата инсталация	Проверка на техническото състояние и всички елементи в опаковката	Проверете дали някои елементи нямат видими механични повреди
На две седмици	Контрол на винтовете и гайките за правилното им закрепване	Уверете се, че всички винтове и горната част са фиксирани здраво
На всеки два месеца	Чистота и общо състояние	В случай на механична повреда незабавно се свържете с производителя

Символи:

	Медицинско изделие
	Дата на производство
	Производител
	Дистрибутор
	Европейско съответствие (съответствие с Европейската общност)
	Каталожен номер
	Сериен номер
	Код на партидата
	Уникален идентификатор на изделието
	Обърнете се към инструкциите за употреба.
	Внимание
	Възможност за блокиране на пръсти
	Пазете от влага
	Пазете от слънчева светлина

	Продуктът е предназначен за транспортиране с автомобил
	Максимално тегло на потребителя
	За вътрешна/външна употреба
	Максимален безопасен наклон
	Продуктът може да се използва в самолет



Данни на вносителя

РЕХА груп ООД

адрес: 8000 гр. Бургас,
жк. Зорница бл.50,

тел.: 056 71 50 71

моб.: 0895 520 540

www.reha.bg